

Erläuterungen zum Einsatz bereitstehender Schutzkleidung an der Esther-Weber-Schule

1. Welche Schutzkleidung steht uns zu Verfügung?

Es stehen alle üblichen Schutzkleidungsbestandteile zu Verfügung (die Ausgabe erfolgt über Frau Knaus und Krankenschwestern).

- a. Schutzkittel (Fr. Knaus)
- b. zertifizierte OP-Masken (Mund-Nasen-Schutz)(Fr.Knaus)
- c. Bei Bedarf FFP 2-Masken (Krankenschwester)
- d. Einmalhandschuhe (Fr. Knaus)
- e. bei Bedarf Schutzbrille (Krankenschwester)
- f. bei Bedarf Schutzvisier (Frau Knaus)

Wann ist welche Schutzkleidung zu tragen?

- Im Umgang mit Schülern, die die Abstandsregeln nicht durchgehend einhalten können und permanent körperliche Nähe suchen, sollen Handschuhe und Mundschutz permanent getragen werden. Bei Schülern, die unkontrolliert niesen, husten bzw. speicheln, bietet eine Schutzbrille oder ein Visier zusätzlichen Schutz.
- Das Tragen eines Schutzkittels ist bei Schülern, die die Abstandsregel nicht einhalten können, möglich aber nicht zwingend notwendig. Wird kein Schutzkittel getragen, sollte die Alltagskleidung nach Beendigung der Betreuung umgehend gewechselt und gewaschen werden.
- Bei der Pflege ist die gesamte Schutzkleidung zu tragen: Schutzkittel, zertifizierte OP-Maske, bei Bedarf Schutzbrille (nach Gebrauch desinfizieren und wiederverwenden). WICHTIG: Berührung der Außenseite der Schutzkleidung vermeiden!
- Für die Pflege und für die Betreuung im Klassenzimmer steht Schutzkleidung zur Verfügung. In den Toiletten sind Haken, an denen die Schutzkittel auf links gedreht, mit der Außenseite zur Wand und personenbezogen beschriftet hingehängt werden. Beim Essen können auch Schürzen getragen werden, die bei Frau Knaus zu erhalten sind.
- Der sichere Umgang mit der Schutzkleidung sollte im Vorfeld geübt werden

Handhabung der Schutzkleidung

1. Hände desinfizieren



2. Zertifizierte OP-Masken (oder wenn gewünscht FFP2-Masken).

- Zertifizierte OP-Maske (li. Bild) bzw. FFP 2-Maske (re.Bild) aus der Verpackung nehmen und nur an den Bändern berühren. Die blaue Seite ist die Außenseite, die weiße Seite ist die Innenseite (s. linkes Bild). Außenseite ist Wasserabweisend und die Innenseite ist absorbierend (z.B. nimmt eigene Tröpfchen von der Ausatemluft auf).




Schutzkleidung – Erläuterungen und Handhabung - Seite 3 von 8

- Mit beiden Bändern die OP-Maske bzw. die FFP 2-Maske über die Nase legen (Draht liegt auf dem Nasenrücken auf). Mit der einen Hand die Maske an den Nasenrücken andrücken, mit der anderen Hand die Maske über das Kinn ziehen, sodass Nase, Mund, Kinn und Wangen bedeckt sind.



3. Verpackung der Schutzkleidung öffnen

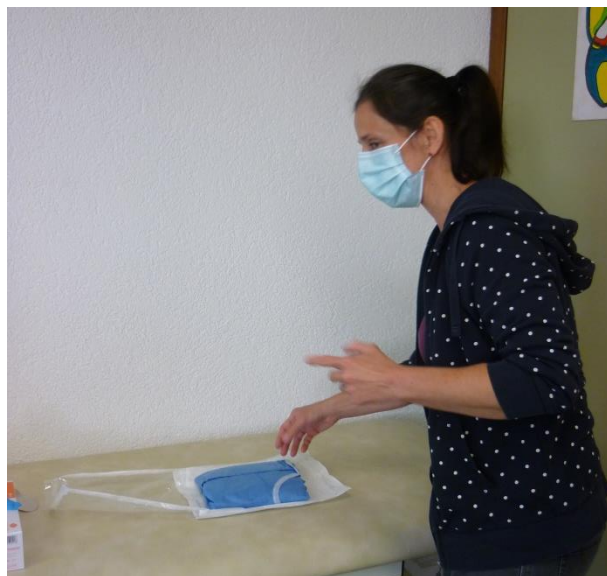

4. In die Arme schlüpfen und Hände durch die Bündchen führen



5. Verschluss im Nacken schließen



6. Verschluss oberhalb der Hüfte schließen



7. Wichtig bei Gebrauch von Handschuhen: Die Handschuhe über die Bündchen des Schutzkittels ziehen.



Ausziehen der Schutzkleidung

Wichtig: Nach jedem Schritt die Hände desinfizieren

1. Handschuhe ausziehen – Handschuhe am Ende am Bündchen anfassen und über die Finger abrollen.



2. Beim Ausziehen nicht Außenseite berühren



3. Kittel ausziehen – Verschlüsse öffnen und Innenseite greifen (nicht verunreinigte Außenseite!)



4. Herunterziehen des Kittels mit der Innenseite nach außen

5. Aufhängen des Kittels mit der Außenseite zur Wand

Wiederanziehen der bereits getragenen Schutzkittel

- Kittel an Innenseite vom Haken nehmen und wie beschrieben anziehen.

Schutzkittel werden am Ende der Dienstzeit in die dafür vorgesehenen geschlossenen Behälter (z.B. Windeleimer in Toilette) geworfen.

Zertifizierte OP-Masken werden spätestens bei Durchfeuchtung in geschlossenen Behälter weggeworfen.

FFP 2-Masken bei Wiederverwendung personenbezogen beschriften und frei hängend an Haken hängen. Nach Dienstende in geschlossenen Behälter wegwerfen.